



# (Compact 525KS) 氧氣機簡易操作說明



使用時間

開關制

電源斷路制

首先將電源接通，  
按一下開關制便可。

按下開關制 “I” 為開機，  
“O” 為關機。




度數錶扭制

度數顯示

黑色走珠

當開機後，度數錶內的黑色  
走珠便會向上升高，用者只  
需利用度數錶的鈕制調較便  
可。  
(黑色走珠要調較到數目字的  
黑色線中間位，方為準確。)

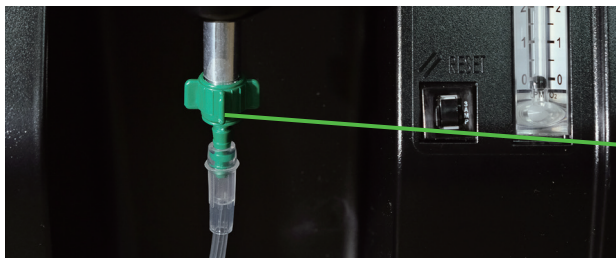

綠色接駁嘴  
(氧氣出口)

氧氣出口只需插上氧氣喉便可。

(如果發現氧氣喉有捲曲或硬化  
跡象，就要提早更換，以免影  
響輸氧的穩定性。)



細菌微塵過濾器

過濾器需要定時更換，  
不用清洗。



機背入風位，  
不能遮蓋。

注意：用者要留意氧氣機的擺放位置，保持機身附近的空氣流通，切勿將機器的四周貼近牆壁，並與牆壁最少預留1呎距離，確保散熱系統正常運作。

\*如需更多氧氣機資料，可致電本公司查詢: 2770-9922。

總公司: 九龍新蒲崗五芳街 27-29 永濟工業大廈 12樓C座  
元朗區服務中心: 元朗安樂路109-111號安樂工業大廈8樓B1室

電話: 2770-9922  
電話: 2442-7766